



ung **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath®
Cricath® Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for
emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebrui-
Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult
ult **IT** Istruzioni **FI** Cricath® Adult **NL** Gebruiksaanwijzing Cricath®
nma talimatları **EN** In-**krikotyreotomiakätétrin käyttöohje** Cricath® Adult
l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult **PT** Instruções
structions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR**
NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath®
ath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de
ctie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult **TR** Cricath®

Cricath Adult -krikotyreotomiakatetrin käyttöohje

Nimi International Emergency Services S.L.



Tuotteen nimi	Cricath® Adult	Steriili	STERILE EO
Tuotteen logo		Kertakäyttöinen	
Sisähalkaisija	2,0 mm	Lue käyttöohjeet	
Pituus	7 cm	Ei sisällä luonnonkumilateksia	
Tuotenumero	REF		

Käyttäjä

Cricath Adult -katetrin saa asentaa vain lääkintähenkilökunta, joka on saanut koulutusta ja kokemusta hengitysteiden hallinnasta, tai se on tehtävä tällaisen henkilökunnan valvonnassa.

Käyttötarkoitus

Cricath Adult on tarkoitettu hengitystien luomiseen henkitorveen, kun perinteinen intubaatio naamarin ja/tai sisähalkaisijaltaan suuren intubaatioputken avulla ei ole mahdollinen aikuispotilailla.

Potilasryhmä

Aikuiset

Vasta-aiheet

Ei tiedossa

Mahdolliset komplikaatiot

- Verenvuoto
- Hematooma
- Katetrin siirtyminen pois paikaltaan
- Kudosemfyseema
- Pneumomediastinum
- Pisto ruokatorveen

Tuotteen kuvaus

Cricath Adult on krikotyreotomiatetri, jonka pituus on 7 cm ja sisähalkaisija 2,0 mm ja joka viedään henkitorveen 1,8 mm:n neulalla.

Pakkaus

- Pakkaus sisältää Cricath Adult -krikotyreotomiatetrin sekä ruiskun ja kaulanauhan.
- Tuote on pakattu aukirepäistävään pakettiin, joka on steriloitu etyleenioksidilla.
- Cricath Adult pysyy steriilinä niin kauan kuin pakkaus on ehjä ja avaamaton. Cricath Adult -katetria ei saa käyttää, jos pakkauksen eheydestä ei ole varmuutta.
- Pakattua tuotetta on säilytettävä kuivassa paikassa.
- Vältä pitkäaikaista altistusta valolle.

Tarvittava lisämateriaali


- Steriili vesi
- Hengityslaite, jossa on Luer-urosliitin (esim. Ventrain®).

Varoitukset ja varotoimet

- Cricath Adult -katetria saa käyttää vain sellaisten hengityslaitteiden (kuten Ventrain) kanssa, jotka toimivat oikein liitettynä sisähalkaisijaltaan pieneen katetriin. Lue hengityslaitteen käyttöohjeet.
- Kiinnitä Cricath Adult tukevasti käytön ajaksi, jotta se pysyy koko ajan paikallaan henkitorvessa.
- Neulaa ei saa työntää katetriin sen jälkeen, kun neula on vedetty pois, koska katetrin seinämään voi tulla vaurio tai reikä.
- Aseptista tekniikkaa ja paikallispuudutetta on käytettävä, jos se on mahdollista ja asianmukaista.

Käyttöohjeet

- 1 Poista suojaputki katetrasta, täytä ruisku steriilillä vedellä tai keittosuolaliuoksella ja kiinnitä se katetriin.
- 2 Valmistelee potilaan kaulan etupuoli.
- 3 Paikanna rengas- ja kilpiruston välissä sijaitseva rengas-kilpirustokudos palpoimalla (kuva A ja A*).
- 4 Stabiloi henkitorvi peukalon ja etusormen väliin.
- 5 Pidä katetria neulan läpinäkyvässä kannassa tai vedellä täytetyssä ruiskussa.
- 6 Vie katetri paikalleen kaudaalisesti pistämällä rengas-kilpirustokudokseen [4]neulan kärjellä (kuva A ja A*). Kun neula saavuttaa henkitorven, vastus häviää.

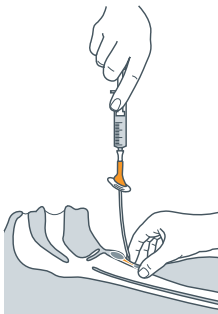


Kuva A




Rengas-kilpirustokudos

Kuva A*

- 7 Varmista katetrin sijainti henkitorvessa vetämällä ruiskun mäntää (kuva B). Sen tulisi aspiroida ilmaa.
- 8 Vie ainoastaan katetria varovasti henkitorveen kaudaalisesti, kunnes kaulus on kaulaa vasten (kuva C).

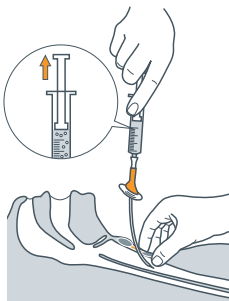

Kuva B

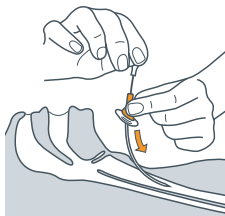

Kuva C

Cricath Adult -krikotyreotomiakatetrin käyttöohje

- 9** Poista sitten neula (*kuva D*). Neulaa ei saa työntää katetriin sen jälkeen, kun neula on vedetty pois, koska katetrin seinämään voi tulla vaurio tai reikä.
- 10** Kiinnitä ruisku katetriin ja aspiroi uudelleen, jotta katetrin sijainti voidaan varmistaa.
- 11** Kiinnitä katetri mukana toimitetulla hihnalla tai muulla menetelmällä (*kuva E*).




Kuva D



Kuva E

- 12** Liitä katetriin sopiva hengityslaitte (kuten Ventrain)(*kuva F*).

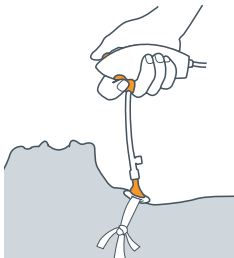

Kuva F



EN Instructions for use Cricath® Adult DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung
Adult NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult PT Instruções de utilização Cricath® Adult
use Cricath® Adult DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult
ksinstructie Cricath® Adult PT Instruções de utilização Cricath® Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları
DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Adult **www.ventinovamedical.com** NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult
Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
de utilização Cricath® Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları EN Instructions for use Cricath® Adult
Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları EN Instructions for use Cricath® Adult
Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult



IES MEDICAL®

Bizkaia Science and Technology Park
Ibaizabal Street, Building 500
48160 Derio (Bizkaia), Spain

T +34 94 400 88 47
info@ventinovamedical.com